


Gebruikshandleiding Infyna Chic™-Katheters



1. Verzamel alle benodigdheden en leg deze klaar.
2. Was uw handen zoals voorgeschreven door uw verpleegkundige.

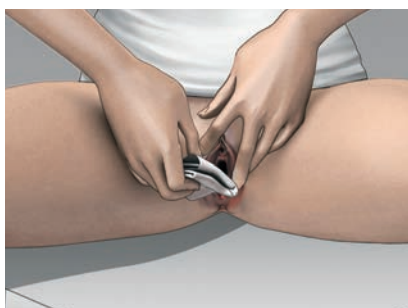


3. Neem een geschikte houding aan voor het uitvoeren van de intermitterende katheterisatie. Maak uw kleding los of verwijder deze zodat u toegang heeft tot uw geslachtsdelen.
4. Spreid de schaamlippen met twee vingers van uw niet-dominante hand. Reinig op advies van uw verpleegkundige het gebied rond de opening van de plasbuis en de geslachtsdelen met uw dominante hand, zoals aangeleerd.




5. Open de koker door de dop met uw dominante hand open te klappen, waardoor u de verzegeling verbreekt. Laat de katheter in de koker zitten. **OPMERKING:** gebruik de katheter niet als het zegel al is verbroken. Indien u een urine-opvangzak wilt gebruiken (niet meegeleverd), bevestig deze aan het connector-uiteinde van de katheter. U hoeft hierbij de katheter niet uit de koker te halen.



6. Houd de koker met uw niet-dominante hand vast en verwijder de katheter uit de koker met uw dominante hand. Raak hierbij alleen de connector aan.

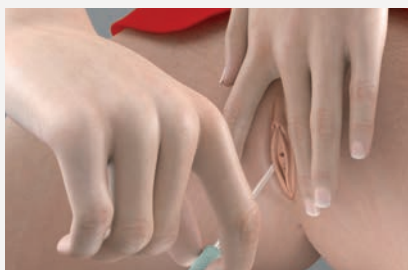

7. Spreid de schaamlippen met twee vingers van uw niet-dominante hand, en breng de katheter in met uw dominante hand in de opening van de plasbuis totdat de urine begint te stromen.

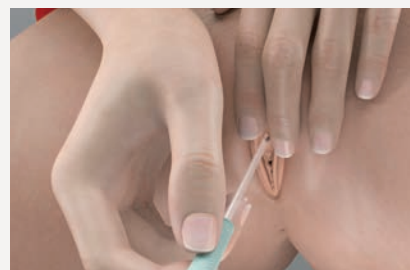

8. Zodra de urinestroom is gestopt, trekt u de katheter langzaam terug. Als de urine opnieuw gaat stromen, onderbreekt u het terugtrekken tot de urinestroom stopt. Verwijder de katheter volledig wanneer u er zeker van bent dat de blaas leeg is.



9. Om de katheter weg te gooien, plaatst u deze weer terug in de koker en sluit u de dop. U kunt vervolgens de koker meteen weggooien in een afvalbak of, als dat beter uitkomt, op een later tijdstip. **NIET DOOR HET TOILET SPOELEN.**



10. Was uw handen.

Infyna Chic™
Intermitterende Katheter

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies. Uitsluitend op voorschrift. Hollister en logo en Infyna Chic zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. ©2021 Hollister Incorporated. klantenservice@hollister.com, www.hollister.nl - NL-00159

CE
0050