


## Uw persoonlijke oefenset

De set is bedoeld om voorlichting te geven over de toepassing van een stomaopvangsysteem en het dragen van een stomaopvangsysteem te simuleren voor personen die zich voorbereiden op een stomaoperatie.

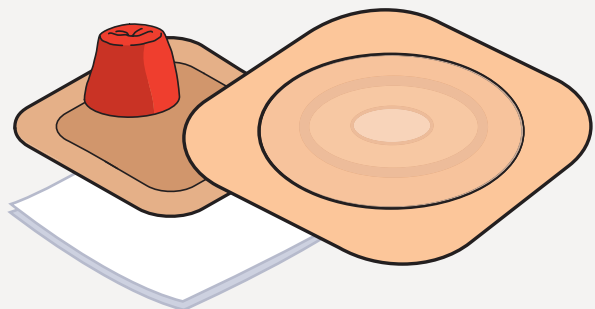


1

Verwijder de beschermfolie van de oefenhuidplak en plaats de huidplak op de buik zoals aangegeven door uw stomaverpleegkundige.




2

Verwijder de beschermfolie van de modelstoma en breng deze aan op de oefenhuidplak die al op uw huid is geplaatst.

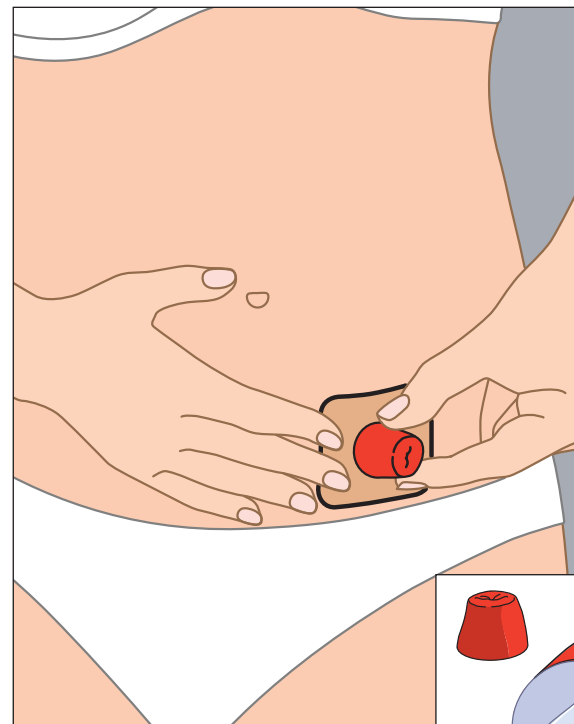

3

Verwijder de beschermfolie van de huidplak. Plaats de huidplak over de modelstoma en druk de huidplak licht aan over de oefenhuidplak en op de huid. Vraag uw stomaverpleegkundige of zorgverlener waar nodig om advies.

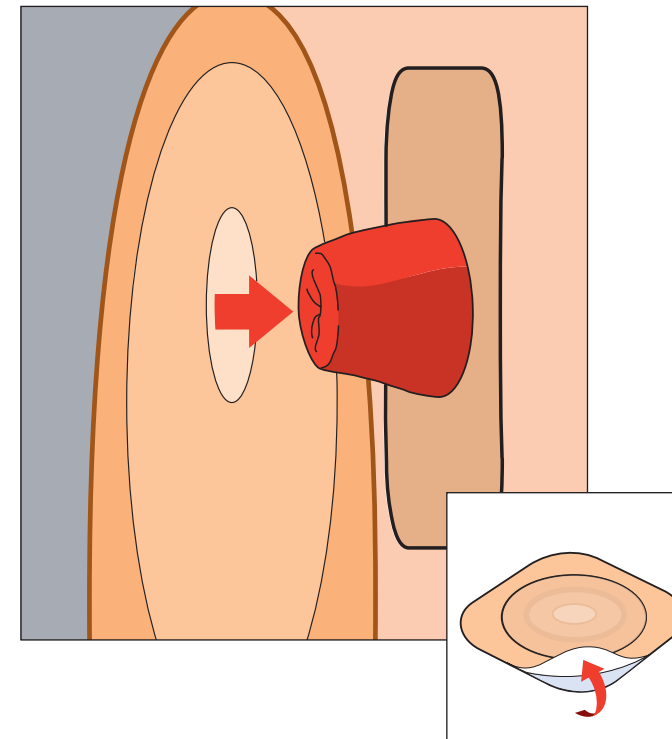

### Hollister

De Brand 28  
3823 LJ Amersfoort  
Nederland  
033 45 01 000  
klantenservice@hollister.com  
www.hollister.nl

Hollister, het Hollister-logo en "Alles begint met een gezonde huid." zijn handelsmerken van Hollister Incorporated.  
© 2022 Hollister Incorporated  
www.hollister.com



Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, IL 60048 USA

EC REP


Hollister ULC  
Foxford Road, Ballina  
Co. Mayo, Ireland

 **Hollister**


**Stomazorg**  
Alles begint met een gezonde huid.

**4**

Bevestig het opvangzakje aan de huidplak bij gebruik van een tweedelig opvangsysteem.

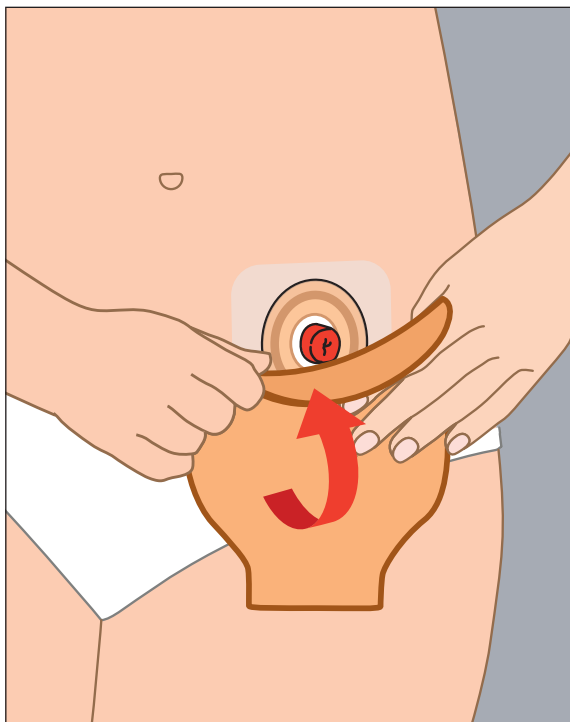
**5**

Pel de huidplak voorzichtig los vanaf de bovenkant van de huid als u de huidplak en het stomaopvangzakje wilt verwijderen en wegwerpen. Indien de oefenstoma niet meer gebruikt wordt: pel de oefenhuidplak voorzichtig omlaag tot deze volledig is verwijderd.

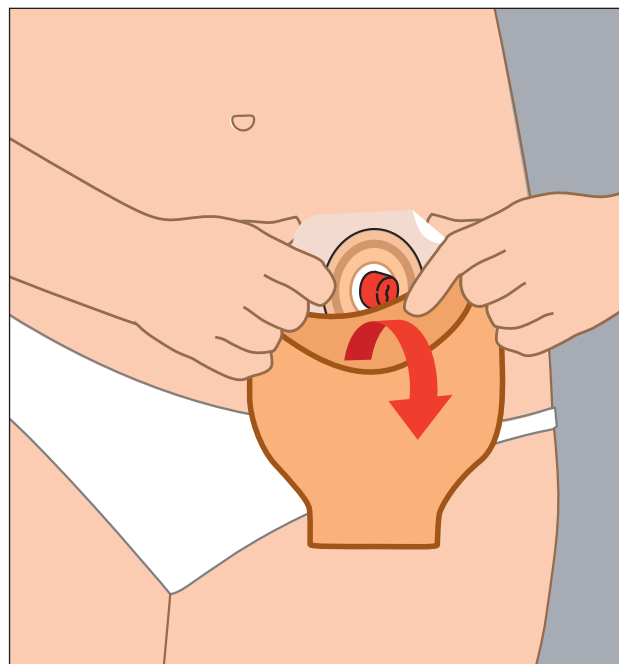

**Optioneel:** u kunt het plakverwijderdoekje\* (bijgesloten) gebruiken terwijl u de oefenhuidplak en huidplak van de huid verwijderd. De gebruiksaanwijzing vindt u bij de plakverwijderdoekjes.

Volg alle lokale regelgeving op omtrent het wegwerpen.

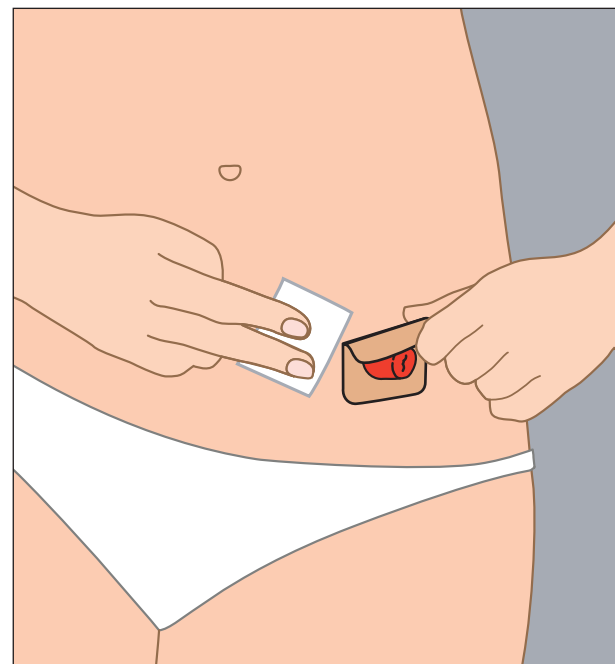

\*Hollister raadt het gebruik van plakverwijderdoekjes in combinatie met standaard stomaproducten niet aan zonder dit eerst met uw stomaverpleegkundige of arts te bespreken.

#### Inhoud van oefenset voor stomaopvangzakjes

- 2 oefenhuidplakken
- 2 modelstoma's
- Stomaopvangsysteem (in de set inbegrepen of door uw stomaverpleegkundige geleverd)
- 2 plakverwijderdoekjes

#### Productbeschrijving

De oefenhuidplak, de modelstoma en het stomaopvangsysteem (zie Inhoud) zijn ontworpen om na de oefenperiode te worden verwijderd en weggeworpen. De oefenhuidplak en huidplak zijn gemaakt van hydrocolloïde hechting, polymeren/copolymeren en een non-woven beschermlaag. De modelstoma is gemaakt van polyurethaan (PUR). Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex.

#### Indicaties en beoogd gebruik

De set is bedoeld om voorlichting te geven over de toepassing van een stomaopvangsysteem en het dragen van een stomaopvangsysteem te simuleren voor personen die zich voorbereiden op een stomaoperatie.

#### Waarschuwingen

Hergebruik van een product bestemd voor eenmalig gebruik kan een potentieel risico vormen voor de gebruiker, zoals een slechte hechting.

#### Voorzorgsmaatregelen

Alleen te gebruiken zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. Stop met gebruik als irritatie optreedt. Als de modelstoma direct op de huid wordt aangebracht, kan er huidbeschadiging optreden (bijv. irritatie, beschadigde huid, uitslag of roodheid).

#### Opmerkingen

Breng het product aan op een schone, droge en niet-beschadigde huid om de juiste hechting van de oefenhuidplak te garanderen. Gebruik geen oliën of lotions. Deze producten kunnen de hechtkracht van de huidplak aantasten. Neem voor hulp met het stomaopvangsysteem of huidirritatie contact op met een stomaverpleegkundige of zorgverlener. In het geval dat er ernstig letsel (incident) optreedt met betrekking tot het gebruik van het product, neem dan contact op met uw lokale distributeur of fabrikant en uw lokale bevoegde instantie ([www.hollister.com/authority](http://www.hollister.com/authority)).



**Hollister**

**Stomazorg**  
Alles begint met een gezonde huid.