


Ervaar de
verandering
met Infyna™


Je hoeft je
geen patiënt te
voelen als je een
katheter nodig
hebt.

Klaar voor gebruik.

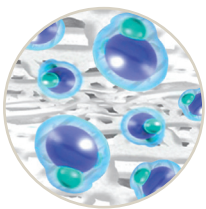

Klaar voor gebruik en minder kans op morsen¹

- Gebruiksklare hydrofiele katheter. Door de toegepaste Vaporphilic® technologie hoeft er geen water te worden toegevoegd.
- De bevochtigde strip in de verpakking zorgt voor steriele waterdamp die de kathetercoating activeert. Eenmaal geopend, is het product klaar voor gebruik.

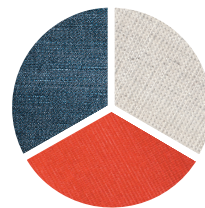

Geen vlekken

- Veroorzaakt geen vlekken in kleding zoals denim, linnen en polyester.²



Openen zonder zorgen

- Gemakkelijk te openen verpakking (door handige strip).



No-touch katheterisatie

- Ontworpen om gecontroleerd en gemakkelijk in te brengen.



Infyna™
Hydrofiele intermitterende
katheter, klaar voor gebruik



Nelaton Standaard

Nelaton Plus

Gemakkelijk katheteriseren zonder morsen

We hebben goed geluisterd en een katheter ontworpen die tegemoetkomt aan de behoeften van de gebruikers.

- Gebruiksklare katheter in gemakkelijk te openen verpakking.
- Evenwichtige balans van soepelheid en stijfheid voor gemak bij het touch-free inbrengen.

Productoverzicht

Infyna Standaard (Nelaton)

maat	ref.nr.	verpakt per
8 Ch	88081	25
10 Ch	88101	25
12 Ch	88121	25
14 Ch	88141	25



Infyna Plus (Nelaton)

maat	ref.nr.	verpakt per
8 Ch	86081	25
10 Ch	86101	25
12 Ch	86121	25
14 Ch	86141	25



Gebruiksaanwijzing

Deze intermitterende katheter is een flexibel slangvormig hulpmiddel dat door de urinebuis ingebracht wordt bij vrouwen en kinderen bij wie urine uit de blaas gehaald moet worden.

- Intermitterende katheter is klaar voor gebruik, voor éénmalig gebruik
- Ftalaat-vrije katheter voorzien van een hydrofiele coating
- 2 gladde katheterogen
- Connector met kleurcodering
- Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex

WAARSCHUWING: Om de kans op infecties of andere complicaties te verkleinen, het product niet hergebruiken.

WAARSCHUWING: Indien men onbehaaglijk wordt of er tekenen van complicatie optreden, stopt u met het gebruik van de katheter en brengt u uw zorgverlener op de hoogte.

VOORZORGSMAATREGELEN: Neemt u contact op met uw zorgverlener alvorens u dit product gebruikt, wanneer een van de volgende problemen zich voordoet:

- Gevoelige plasbuis • Onverklaarbare bloeding uit de urinebuis • Uitgesproken strictuur • Foutieve passage • Urethritis - ontsteking van de plasbuis

VOORZORGSMAATREGELEN: Voor het zelf inbrengen van een katheter dient u altijd het zorgplan en advies van uw zorgverlener op te volgen, die uitsluitend mogen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Omdat de katheterisatiefrequentie van persoon tot persoon varieert, dient de aanbevolen frequentie voor uw katheterisatie door uw zorgverlener te worden aangegeven. Neem voor andere vragen over uw katheterisatie contact op met uw zorgverlener.

LET OP: Berg de dozen bij voorkeur op in een horizontale positie bij kamertemperatuur. Dit product bestaat uit de volgende onderdelen: polyvinylchloride connector en katheter vervaardigd zonder ftalaten.

REFERENTIES

1. Data on file. Loose water in packaging study. Hollister. 2015
2. Data on file. Analysis of potential loose liquid to stain clothing. Hollister. 2015.

Hollister BV
De Brand 28
3823 LJ Amersfoort
www.hollister.nl

Meer informatie?

Neem contact op met uw Hollister accountmanager of via klantenservice@hollister.com