

Gebruikshandleiding VaPro Plus Pocket™ - katheters




1. Leg alle benodigdheden klaar en bereid het gebied voor.
2. Was uw handen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.
3. Neem een geschikte houding aan voor het uitvoeren van intermitterende katheterisatie. Maak uw kleding los of doe deze uit zodat u toegang heeft tot uw geslachtsdelen.



- 4a. Open de verpakking. Om de verpakking te openen, trekt u de vingeropening naar u toe en naar beneden.



- 4b. Haal de katheter uit de verpakking.
5. Houd de katheter in de ene hand met de opvangzak naar boven gericht en duw de zak met de andere hand weg van de katheter om de papieren band te verbreken. Ontvouw de opvangzak. Laat de katheter op uw schoot, in de gootsteen of op een andere vlakke ondergrond liggen.

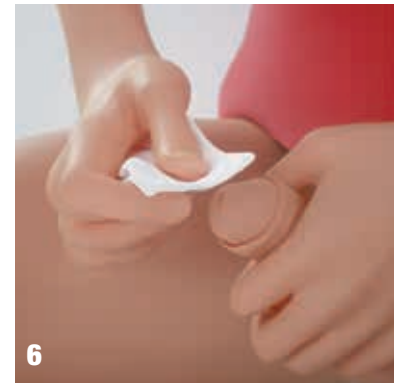

6. Houd de penis vast met uw niet-dominante hand en blijf deze vasthouden tot u klaar bent met katheteriseren. Schuif de voorhuid (indien aanwezig) terug en reinig de eikel zoals aangeleerd door uw zorgverlener.



7. Verwijder het ringdopje van de beschermende inbrengtip.




8. Houd de katheter in de ene hand, en schuif met de andere hand de katheter tot vooraan in de beschermende inbrengtip. Zorg ervoor dat de katheter niet uit de beschermende inbrengtip steekt.
9. Pak de katheter vast onderaan de beschermende inbrengtip.

VaPro Plus Pocket™
No Touch Intermittierende Katheter



10. Knijp met de vingers en wijsvinger van uw niet-dominante hand zacht in de eikel om de urinebuis meer te openen. Breng met uw dominante hand de beschermende inbrengtip in tot het plaatje in contact komt met de urinebuis.

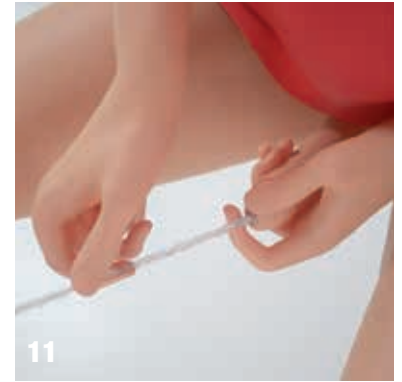

11. Breng de katheter zover in tot de urine begint te stromen.

12. Zodra de urinestroom is gestopt trekt u de katheter langzaam terug. Als de urine opnieuw gaat stromen wacht u even met terugtrekken tot de urinestroom stopt. Verwijder de katheter volledig wanneer u er zeker van bent dat de blaas leeg is. Schuif de voorhuid (indien aanwezig) terug naar voren.



13. Houd de urineopvangzak na de katheterisatie bij de handgreep vast.

14. Leeg de opvangzak voordat u deze weggooit door de zak bij de pijl (Tear here to empty) open te scheuren en de urine te laten wegstromen.

15. Gooi de katheter, opvangzak en verpakking in een afvalbak. NIET DOOR HET TOILET SPOELEN.



16. Was uw handen.

WAARSCHUWINGEN:

Om de kans op infecties of andere complicaties te verkleinen, het product niet hergebruiken.

Indien men onbehaaglijk wordt of er tekenen van complicatie optreden, stopt u met het gebruik van de katheter en brengt u uw zorgverlener op de hoogte.

- Gebruiksklare intermitterende katheter met geïntegreerde urine-opvangzak voor éénmalig gebruik
- Inbrengtip en afvoerhuls. Deze zorgt er voor dat de katheter niet hoeft te worden aangeraakt
- Connector met kleur-codering geeft kathetermaat aan
- 1000 mL opvangzak
- Ftalaat-vrije katheter voorzien van een hydrofiele coating
- 2 gladde katheterogen
- Dopje voorzien van een ringetje om het verwijderen te vergemakkelijken
- Niet vervaardigd uit natuurlijk rubber latex

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Deze intermitterende katheter is een flexibel slangvormig hulpmiddel dat door de urinebuis ingebracht wordt bij mannen, vrouwen en kinderen bij wie urine uit de blaas gehaald moet worden.

VOORZORGSMAATREGELEN: Neemt u contact op met uw zorgverlener alvorens u dit product gebruikt, wanneer een van de volgende problemen zich voordoet:

- Gevoelige plasbuis
- Overduidelijke stricturen
- Urethritis - ontsteking van de plasbuis
- Epididymitis - ontsteking van de bijbal (zaadballeider)
- Onverklaarbare bloeding uit de urinebuis
- Foutieve passage
- Prostatitis - ontsteking van de prostaat

Voor het zelf inbrengen van een katheter dient u altijd het zorgplan en advies van uw zorgverlener op te volgen, die uitsluitend mogen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Omdat de katheterisatiefrequentie van persoon tot persoon varieert, dient de aanbevolen frequentie voor uw katheterisatie door uw zorgverlener te worden aangegeven. Neem voor andere vragen over uw katheterisatie contact op met uw zorgverlener.

LET OP: Berg de dozen bij voorkeur op in een horizontale positie bij kamertemperatuur. Dit product bestaat uit: polyurethaan sleeve, thermoplastisch elastomeer uiteinde en een slang niet vervaardigd met DEHP.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies. Uitsluitend op voorschrift.

Hollister bv

0800 - 52 30 352

klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl